

מגן עקב היליפט מידות והתאמות

משווק בישראל ע"י אר-קיור מדיקל טל. 03-5329157 פקס. 077-5244141 www.rcure.co.il



- בחירה של המבנה הפנימי (חלק או משונן)
- זמין במידות סטנדרט, בריאטרי, וקטן
- עשוי מקצף פוליאוריתן ללא לטקס
- מומלץ לשימוש במטופל אחד (Single-patient use).



טבלת התאמה מומלצת למטופלים:

	משקל	היקף השוק	גובה
סטנדרט	54-133 ק"ג	20-36 ס"מ	1.52-1.96 מטר
בריאטרי	100-271 ק"ג	30-58 ס"מ	1.65-2.03 מטר
קטן	32-50 ק"ג	15-25 ס"מ	1.17-1.63 מטר


שימוש קל והתאמה:



1 בדוק האם המגף מתאים, אתה אמור להיות מסוגל להעביר אצבע בין מגרעת העקב לבין המיטה. המגף לא אמור לזוז בחופשיות על הרגל.



2 משוך את רצועות הסגירה, מעל לרגל לכיוון לולאות הסגירה. העבר את הרצועה דרך הלולאה. השתמש בו ובלולאה כדי לסגור ולאבטח את הרצועות. השאר את דש המגן פתוח קלות כדי לספק אורור נוסף.

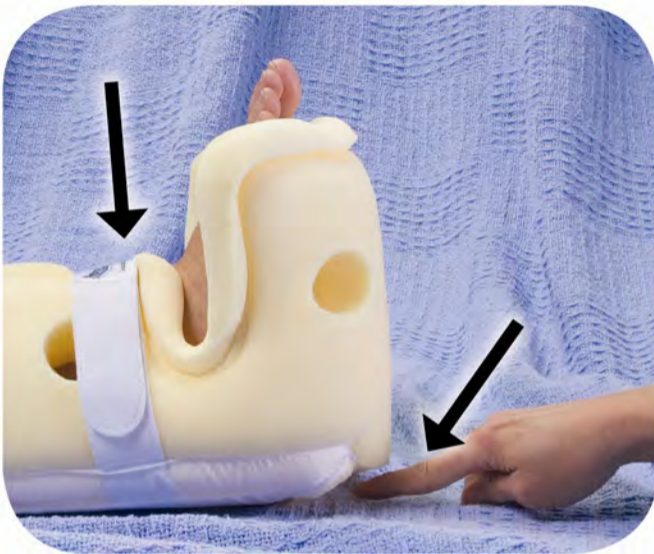


3 הנח את הרגל בתוך המגף כשהעקב מונח מעל מגרעת העקב וממוקם מעל החלק התחתון של פד ההגבהה.

צניחת כף הרגל



הנח את הפד הנוסף בצורה אנכית מאחורי מדרך כף הרגל.

פצע לחץ בקרסול

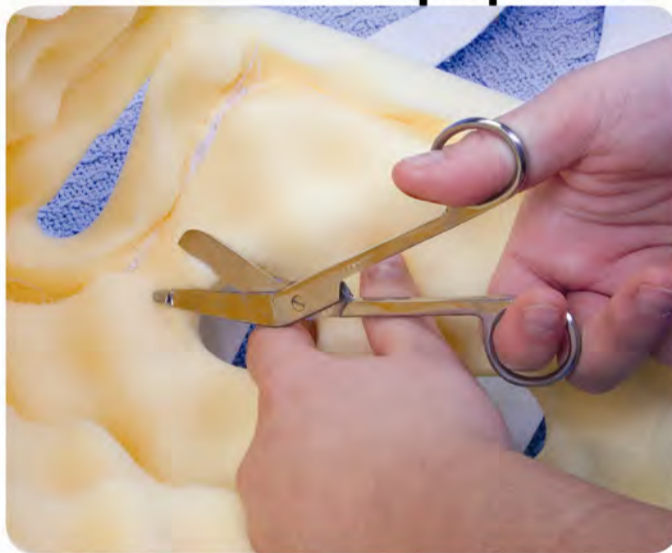

גזור את הבליטות המקיפות את הקרסול, גזור חלק מהפד הקבוע אם יש צורך.

טיבוב ירך



הנח את הפד הנוסף בצורה מאוזנת בצד החיצוני של הרגל.

גיד אכילס



אם מופיעה אדמומיות באזור, גזור צורת וי מהפד הקבוע, אם משתמשים בשני הפדים גזור את הפד העליון.